

Oxivir Sporicide Wipe CE

Toallitas limpiadoras y desinfectante de amplio espectro

Descripción

Diversey Care Oxivir Sporicide Wipe es un limpiador desinfectante listo para usar en un solo paso efectivo, entre otros, frente a Clostridium difficile y Bacillus subtilis. Basado en la tecnología de Peróxido de Hidrógeno Acelerado (AHP), Oxivir Sporicide Wipe puede aplicarse, para desinfectar superficies no porosas en el entorno médicohospitalario y aparatos médicos no invasios.

Propiedades

- Efectivo frente a *C difficile* en 1 minuto*
- Esporicida, Bactericida, Virucida, Levuricida, Fungicida, en tan sólo 1 minuto
- Perfil de seguridad de usuario y superficies positivo, en comparación con otros esporicidas
- Limpiador eficaz
- Sin perfume
- Se descompone en agua y oxígeno No deja residuos activos tras su aplicación
- No contiene cloro o alcohol

Beneficios

- Excelente respuesta frente a brotes de *C difficile*
- Amplia eficacia frente a todas las otras clases de patógenos, proporcionando un alto nivel de protección en los pacientes
- Tiempos reducidos de contacto que garantizan la eficacia del desinfectante
- No requiere aclarado
- No produce irritación de las vías respiratorias
- Producto adecuado para áreas de alto riesgo de infección en entornos hospitalarios incluyendo, quirófanos, UCIs, UVIs, unidades de neonatos y todo tipo de habitaciones de pacientes.

Modo de empleo

Limpieza y desinfección:

- 1. Eliminar la suciedad gruesa.
- 2. Abrir el paquete de toallitas, sacar una toallita y cerrar de nuevo.
- 3. Pasar la toallita por la superficie, asegurando que húmeda, dejar secar al aire.
- 4. Asegurarse que la superficie queda húmeda el tiempo necesario de contacto.
- 5. Cambiar de toallita cuand esta esté visiblemente limpia o cuando cambie de área de limpieza.
- * Cuando se aplica como desinfectante final con un paso previo de limpieza







A.I.S.E.



Oxivir Sporicide Wipe CE

Información técnica

Apariencia: Toallitas de polipropileno de 25GSM

pH (producto diluido): 2.7 ± 0.3 Densidad Relativa (20°C): 1.03265

Caducidad: 720 días

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420. Restringido a usos profesionales.

***Please translate: Reacts with oxidisable substances. ***

Compatibilidad del producto

Se debe llevar guantes cuando se aplique Oxivir Sporicide Wipe. No mezclar con otros productos. No aplicar sobre superficies sensibles al agua o a los productos ácidos.

Información microbiológica

Eficacia probada cumpliendo las normas europeas: EN13727, EN13624, EN13697, EN14476, EN13704, EN14348 y EN16615.

Información medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC 648/2004.