



Oxivir Plus Spray

Detergente - desinfectante de amplio espectro

Descripción

Diversey Oxivir Plus Spray es detergente desinfectante líquido listo para usar en la limpieza y desinfección de todas las superficies duras resistentes al agua y la mayoría de mobiliario delicado.

Propiedades

- Efectivo frente a un amplio espectro de: bacterias, virus, hongos y levaduras
- Basado en la innovadora tecnología patentada del Peróxido de Hidrogeno Acelerado
- Tiempos de contacto reducidos.
- Eficaz detergente
- Sin perfume

Beneficios

- Probado exhaustivamente siguiendo las normas europeas siendo efectivo frente a múltiples patógenos, incluyendo VIH, VHB, VHC, Gripe aviar, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella entérica, MRSA, VRE y Norovirus
- Limpia y desinfecta en un solo paso, reduciendo el tiempo de trabajo
- Excelente rendimiento de limpieza y capacidad desincrustante en un solo paso
- Producto seguro con el usuario, sin pictogramas de peligrosidad. No contiene irritantes respiratorios.
- La formulación de AHP es respetuosa con las superficies y prolonga su vida útil
- Buen perfil ambiental. Se descompone en oxígeno y agua
- Producto adecuado para áreas de alto riesgo de infección en entornos hospitalarios incluyendo, quirófanos, UCIs, UVI, unidades de neonatos y todo tipo de habitaciones de pacientes.

Modo de empleo


Limpieza y desinfección con pulverización:

1. Eliminar la suciedad suelta.
2. Pulverizar sobre las superficies.
3. Limpiar con un paño limpio.

Para desinfectar Norovirus: Realice una limpieza previa a la desinfección. Deje que actúe el producto manteniendo la superficie húmeda al menos 2 minutos.

Dosificación:

Producto listo para usar, no requiere dilución.

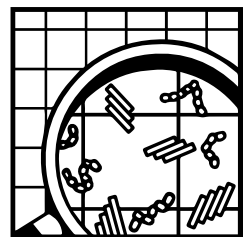

© A.I.S.E.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



Oxivir Plus Spray

Información técnica

Apariencia: Líquido, amarillo transparente

pH (producto diluido): 1.8

Densidad Relativa (20°C): 1.000

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseymexico.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420. Restringido a usos profesionales.

Reacciona en contacto con sustancias sensibles a los productos ácidos.

Compatibilidad del producto

No mezclar con otros productos. No usar sobre superficies sensibles al agua o a productos ácidos. Utilizado bajo las recomendaciones de uso de Diversey Oxivir Plus Spray es adecuado para la mayoría de materiales comunes.

Información microbiológica

Eficacia probada cumpliendo las normas europeas: EN1276, EN13697, EN1650, EN14776, EN13624 y EN13727.

Información medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

Envases disponibles

Diversey Oxivir Plus Spray está disponible en 6x0,75L.