



**STRANFFORD TEXTIL S.L**

Tel : +34 967 219 620

Fax : +34 967 52 30 08

Parque Empresarial Campollano Av. 5ª nº14

02007 ALBACETE

NIF: B-02223485

## FICHA TECNICA

**CE 0161**  
**CAT III**

*MASCARILLA PROTECCION **FFP2***

FABRICANTE :	STRANFFORD TEXTIL S.L
CLASIFICACION SEGÚN LA NORMA :	EN 149:2001 + A1:2009
TIPO :	MASCARILLA FILTRANTE - NR FFP2
CERTIFICADO CE 0161 :	CERTIFICACION Nº20/3327/00/0161 (AITEX)
REFERENCIA MASCARILLA :	03021960

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

\*COMPOSICION MASCARILLA 5 CAPAS :

*1ª CAPA POLIPROPILENO SPUNBOND*

*2ª CAPA MELT-BLOWN*

*3ª CAPA AIR COTTON*

*4ª CAPA MELT-BLOWN*

*5ª CAPA POLIPROPILENO SPUNBOND*

\*DOBLE GOMA DE AJUSTE SIN LATEX

\*CLIP NASAL PARA AJUSTE

\*MASCARILLA NO REUTILIZABLE

### INFORME DE ENSAYO AITEX Nº2020EC4248

INSPECCION VISUAL : *CUMPLE*

PENETRACION DEL FILTRO CON ACEITE PARAFINA : *97,4% CUMPLE*

PENETRACION DEL FILTRO CON CLORURO SODICO : *99,4% CUMPLE*

CONTENIDO DE CO2 EN AIRE INHALADO : *CUMPLE*

RESISTENCIA A LA RESPIRACION : *2,2 l/m CUMPLE*

INFLAMABILIDAD : *CUMPLE*

DETERMINACION DE LA FUGA HACIA EL INTERIOR : *CUMPLE*

COMPORTAMIENTO PRACTICO : *CUMPLE*



## INSTRUCCIONES DE USO

1. Sujétela con una mano, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.
2. Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de las mascarillas están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

\*Almacenamiento en interiores con humedad inferior al 80% sin gases corrosivos y bien ventilado, lejos del calor.



## ETIQUETADO Y EMBALAJE DEL PRODUCTO

El etiquetado del producto cumple con los requisitos de la normativa EN 149:2001+A1:2009.

Embalaje en cajas de 20 unidades embolsadas individualmente.

Contenido de caja : 27 cajas de 20u total 540u.

## DISEÑO MASCARILLA Y EMBALAJE

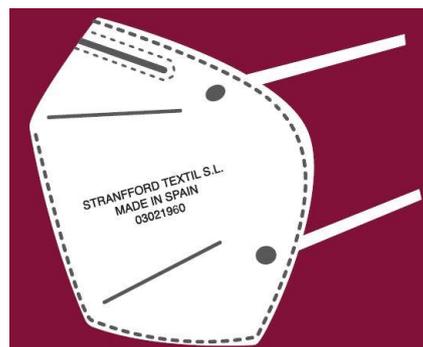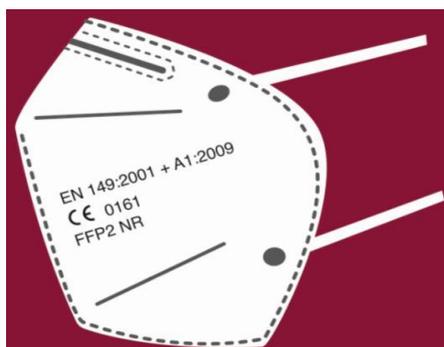

STRANFFORD TEXTIL S.L Pol.ind.campollano avd.5 nº14 02007 Albacete  
B02223485