



Suma Med Enzyme

Detergente enzimático para la limpieza de Instrumental médico quirúrgico

Descripción

Suma Med Enzyme es un detergente líquido enzimático especialmente formulado para dar excelentes resultados en la eliminación de suciedad en la limpieza de instrumental médico en condiciones de aguas blandas-medias.

Propiedades

Suma Med Enzyme es un detergente líquido enzimático adecuado para utilizar en un amplio rango de máquinas de limpieza-desinfección y máquinas de lavado automático. El producto está especialmente formulado para la eliminación de suciedad en instrumental médico en máquinas de limpieza y desinfección. Contiene un enzima proteolítica que proporciona una excelente eliminación de la suciedad en condiciones dureza de agua blanda-media.

Beneficios

- Eficaz con la suciedad y la sangre seca
- Su fórmula concentrada proporciona un ahorro de costes
- La limpieza con enzimas protege los instrumentos fabricados con materiales sensibles al pH
- Fácil de manejar por su formato de 2x5L


Modo de empleo

Suma Med Enzyme normalmente se aplica usando equipos de dosificación automática a una concentración de 2-6 ml/l y empezando con 20-25°C.

Insertar el tubo de succión en el envase del detergente, la dosificación correcta debe ser programada.

El producto también puede usarse manualmente. Se recomienda el uso de guantes (PVC, nitrilo, látex o neopreno) si el producto se aplica manualmente.

Las dosificaciones están determinadas dependiendo de las condiciones locales del agua.

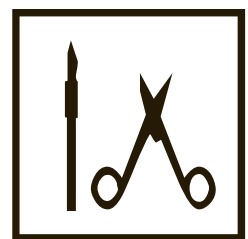

© A.I.S.E.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



Suma Med Enzyme

Información técnica

Apariencia: Líquido transparente incoloro

ph (solución al 1% a 20°C): 8.5

Densidad Relativa (20°C): 1.15

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto

Bajo las condiciones recomendadas de uso, Suma Med Enzyme es compatible con la mayoría de superficies hospitalarias.

Envases disponibles

Suma Med Enzyme está disponible en envase de 2x5L.